

Actualización de software para su Element RCX/VB1 Wifi (CK012)

Actualización de software para su Skyla VB1 Clásica (AK09)

Estimado usuario,

Nos complace informarles de una nueva actualización de software por parte del fabricante para optimizar el rendimiento del dispositivo y del software con instrucciones de instalación detalladas.

La actualización incluye el siguiente ajuste:

- Ampliación del rango de medición de SAA (5 – 500 µg/ml)
- Adaptación de la unidad de #C-Ca al mismo rango/unidades de referencia con el marcador Ca.
- Añadir mensaje de advertencia cuando la CPK afecte a los resultados de la prueba de Potasio (K)". Para muestras con CPK >1500 U/L, los resultados de K se verán interferidos con una desviación de >20%."
- Mejorar el rendimiento del ensayo de glucosa
- Mejorar el rendimiento específico de algunos LOTs para los parámetros: CHOL, PHOS, TP

SOLOPARA LOS MODELOS RCX Y VB1 WIFI:

- Solicitud bidireccional de ensayos simples y dobles para la especie caballo**

**Solicitud bidireccional de ensayo simple y doble bajo la especie de caballo



- Enviar la orden de análisis al element RCX
- Seleccione la orden en el dispositivo
- Inserte el Carrier SA con la prueba (rotor metálico)



- Se le pedirá que vuelva a seleccionar la especie



- Seleccionar perro o gato
- La medición continuará como de costumbre
- Aún recibirá los rangos de referencia para la especie caballo

Para garantizar la funcionalidad óptima de su Element RCX, le recomendamos que realice la actualización lo antes posible.



Tómese el tiempo suficiente para instalar la actualización. Por favor, siga las instrucciones detalladas en el archivo adjunto.



Si tiene alguna pregunta sobre la implementación de la actualización de software, no dude en ponerse en contacto con nuestra línea directa de servicio.

Nuestra línea directa de servicio: 948 82 46 55. Ext.1

¡Somos tu contacto!

Atentamente

Su empresa Scil animal care company SLU

Eugenia Alvarez Carracedo

Product Manager Diagnóstico de Laboratorio. (Telf. 674 626 106)



Cómo instalar la actualización de software

Se requiere una memoria USB vacía con al menos 50 MB de espacio de almacenamiento.

- Descargue la actualización de software en el área de descargas del sitio web de scil <https://www.scilvet.es/productos/laboratorio/Bioquimica/element-rcx/>
- El paquete de software se incluye en el archivo .zip.
- Extraiga del .zip los 2 archivos y cópielos en la unidad flash USB

- Asegúrese de que los siguientes archivos estén en la memoria USB:

Actualización para RCX/ VB1 Wifi:

- 📄 HBP01_VERSION_DON'T_CARE
- 📄 ScilRCX_20221130_084023_CK12.bin

Nota: AK09 para los usuarios con el modelo Skyla VB1 clásica.

- Inserte la unidad flash USB en un puerto USB disponible en la parte posterior del Element RCX/VB1.
- Encienda el analizador.
- Toque el menú Configuración - Administrador - Actualización del sistema.
- La actualización se instalará automáticamente. Una vez completada la instalación, el element RCX/VB1 reinicia el software. Espere hasta que aparezca el menú de inicio y, a continuación, retire la memoria USB.
- Una vez finalizado, comprobamos si la versión de software es la nueva, para ello pulsamos: Configuración / Configuración general del sistema/ Versión de software.