


Instrucciones de actualización de softwares **Element I+**

Resumen:


Este documento proporciona instrucciones sobre cómo actualizar el software del Element i+ Analyzer a la versión 1.4.0.1.

Instrucciones de actualización:

1. Copie el archivo de actualización en una unidad USB vacía (no comprimida)

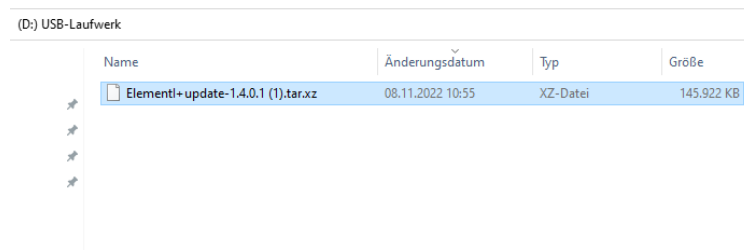


2. Encienda el analizador element I+
3. Ingrese al menú de configuración haciendo clic en el icono "Engranaje" en la parte superior derecha
4. Haga clic en el botón "Versión de software"
5. Confirme que la **"Versión de la aplicación" que tiene es 1.2.0.1 (o superior)**
! Importante: si la versión de la aplicación es inferior, póngase en contacto con el servicio técnico, ¡no realice una actualización de software!

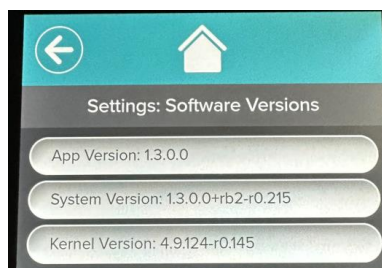


6. Inserte la unidad USB con el archivo de actualización en el puerto USB del dispositivo
7. Volver a hacer clic en el icono "Casa"
8. Click en el icono "Engranaje" parte superior derecha de la pantalla.
9. Haga clic en "Administrador"

Instrucciones de actualización de softwares **Element I+**

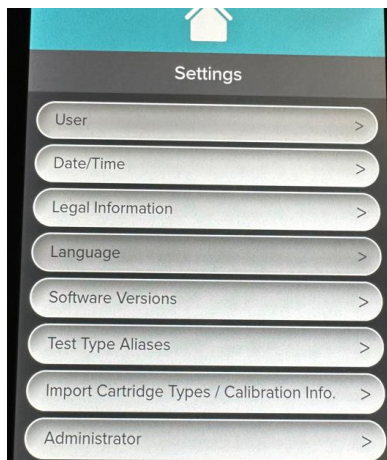


10. Introduzca → el nombre de usuario: **admin** y la contraseña: **admin**

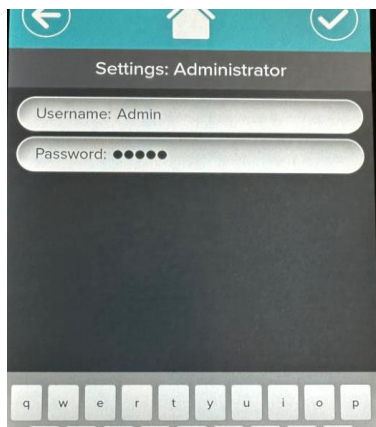


11. Ingrese al menú de actualización haciendo clic en "Actualización del sistema"

12. Confirme que la actualización en la unidad USB está disponible observando el mensaje:
"Actualización del sistema disponible en la unidad USB"

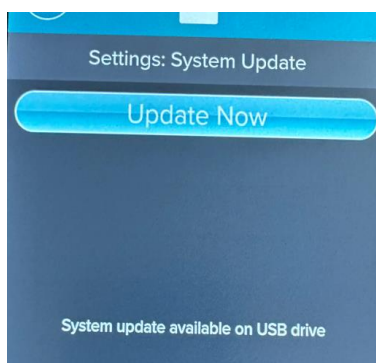

Instrucciones de actualización de softwares **Element I+**

13. Cuando la actualización esté disponible, inicie la actualización haciendo clic en "**Actualizar ahora**"
14. Haga clic en "Reiniciar ahora" después de que se haya completado la actualización (~ 10 minutos), el analizador se apaga

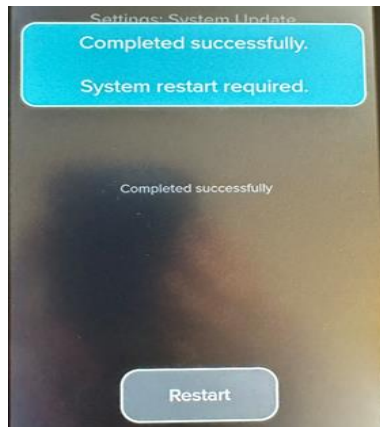

15. Encienda el analizador Element I+ pulsando el botón de encendido situado en la parte posterior del analizador.
16. Ingrese al menú de configuración haciendo clic en el icono "Engranaje"
17. Haga clic en "Versión de software"
18. Confirme que "Versión de la aplicación" muestra el mismo número que el archivo de actualización.

Solución de problemas si no se reconoce la actualización en la unidad USB:

1. Haga clic en el botón "Check USB Drive" (Comprobar unidad USB) para forzar al analizador a volver a escanear la unidad en busca de actualizaciones
2. Asegúrese de que no haya otras unidades USB conectadas al analizador
3. Intente extraer la unidad USB e insertarla en un puerto USB diferente en la parte posterior del analizador y haga clic en "Verificar unidad USB"
4. Algunas unidades USB de gran capacidad se formatean de forma predeterminada con un sistema de archivos que es incompatible con Element i+ Analyzer. Pruebe con otra unidad USB, posiblemente con una capacidad menor.