



Element DC / Samsung PT10V. Nueva Versión de actualización de software: 2.09.51

Estimado usuario,

Su nueva actualización de software Element DC / Samsung PT10V (Vers. 2.09.51) está disponible como parte de un desarrollo continuo del producto. Esta nueva versión incluye nuevas funciones, mejoras y también los siguientes cambios:

- Adaptaciones de rangos de referencia a los valores.

	Parámetro / Especie	Rangos / Unidad
NUEVO	Globulinas / Gato	3.0-5.7 g/dL

- **SOLO** para el Samsung PT10V: se muestra el nuevo logotipo de Element
- Rendimiento optimizado para algunos parámetros.



La instalación de la actualización de software es **obligatoria**. Por lo tanto, le rogamos que **instale la actualización rápidamente**.

Para la instalación de la actualización de software, simplemente siga los pasos descritos en las instrucciones de instalación adjuntas.

En caso de preguntas relacionadas con la actualización del software, comuníquese con la línea directa de servicio de su compañía local de cuidado de animales.

¡Somos su contacto para cualquier consulta!: Servicio Técnico Scil, estamos a su disposición en el número de teléfono 948 82 46 55. Ext.1.

Y a través del correo electrónico: servicio-es@scilvet.com.

Un cordial saludo,
su scil animal care company

Eugenia Alvarez Carracedo
Jefe de producto de diagnóstico de laboratorio



Instrucciones para actualizar el software en el Element DC / Samsung PT10V

Actualización USB

Descargue la actualización de software en una memoria USB

1. Abra la [URL **http://www.scilvet.de/service/downloads/**](http://www.scilvet.de/service/downloads/) en el navegador de Internet.
2. Busque el element DC en la lista de equipamiento de laboratorio.
3. Seleccione en el element DC/Downloads/ Software-Update-Vers-2.09.51.
4. Guarde la carpeta zip en su PC y extraiga cada archivo.
5. Guarde los archivos de actualización en una memoria USB vacía.
6. Enciende tu dispositivo.
7. Inserte la memoria USB en el puerto USB de la parte posterior del dispositivo.

Llevar a cabo la actualización de software en el dispositivo

1. Seleccione el menú "Configuración".
2. Seleccione el elemento de menú "Sistema".
3. Seleccione el elemento de menú "Actualizar".
4. Seleccione la fuente de actualización "Memoria USB".
5. La actualización se instalará automáticamente.
6. Retire la memoria USB una vez completada la actualización.
7. Realice un "reinicio" del dispositivo.
8. **SOLO** para el Samsung PT10V: inserte nuevamente la memoria USB y repita el procedimiento.